

# Desinfección diaria con Orotol plus u Orotol plus pH 7

1 - 2 veces por día\*



\*en días de atención al paciente

## 1 Limpieza previa



Aspirar 2 litros de agua (PRECAUCIÓN: nunca agregue agua al sistema a una temperatura superior a 35°C)

Los concentrados Orotol plus y Orotol plus pH 7 son la solución perfecta para la desinfección, desodorización, limpieza y cuidado simultáneos de todos los sistemas de aspiración y separadores de amalgama.

Usar al finalizar la jornada laboral o dos veces al día (al mediodía y por la noche) si los niveles de contaminación son elevados.



Ver tutorial



## 2 Dosificación del 2 %



Añadir 40 ml (2 tapones) de Orotol plus y rellenar con agua del grifo hasta la marca de 2 litros.

## 3 Desinfección sistema de aspiración



Conectar las mangueras y aspirar 1 litro de solución hasta que se active el Auto-Stop.

## 4 Escupidera



Añadir el litro restante de la solución en la escupidera.

## 5 Tiempo de actuación



Espectro de acción: Bactericida, levurocida, virucida limitado (virus encapsulado, incluyendo HBV, HCV, HIV y coronavirus), así como adenovirus y norovirus

Dejar actuar durante 5 - 60 Min.

## 6 Enjuague de la unidad de tratamiento



Transcurrido el tiempo de actuación, aspirar 2 litros de agua.

DÜRR DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN

# Limpieza semanal con MD 555 cleaner o MD 555 cleaner organic

Mín. 2 x / semana



\* Diariamente si el tiempo de contacto es más corto

## 1 Limpieza previa



Aclarar la unidad con 2 litros de agua fría con OroCup.

El MD 555 cleaner y el MD 555 cleaner organic son limpiadores especiales concentrados y antiespumantes para todo tipo de sistemas de aspiración y separadores de amalgama. Poseen un alto poder descalcificador para eliminar depósitos, incrustaciones y sedimentaciones.


Ideal en combinación con Orotol plus. Aplicar con OroCup 1 ó 2 veces por semana, preferiblemente a media mañana. En casos más severos, aplicar cada día hasta que mejore el problema.



Ver tutorial



## 2 Dosificación del 5 %

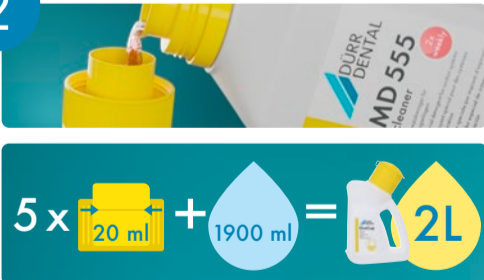

Añadir 100 ml (5 tapones) de MD555 cleaner y rellenar con agua del grifo hasta la marca de 2 litros.

## 3 Limpieza sistema de aspiración



Conectar las mangueras y aspirar 1 litro de la solución hasta que se active el Auto-Stop

## 4 Escupidera



Añadir el litro restante de la solución en la escupidera.

## 5 Tiempo de actuación



Dejar actuar durante 30 - 120 Min.



Dejar actuar durante 5 - 15 Min.

IMPORTANTE: Nunca dejar actuar durante la noche

## 6 Enjuague de la unidad de tratamiento



Transcurrido el tiempo de actuación, aspirar 2 litros de agua.

DÜRR DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN